













| | |
|---|--|
|  | |
| PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA, USO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | |
| OBJETIVO: Determinar las características técnicas de los elementos de protección personal como medida de prevención y autocuidado, demostrando su uso y mantenimiento, con el fin de prevenir peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores durante el desarrollo de la jornada laboral. | |
| DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Para cada elemento de protección personal se deben considerar las siguientes características, instrucciones de entrega, uso y mantenimiento: | |
| GUANTES DE LATEX | |
| AREA | Consultorio Médico |
| CARACTERISTICAS | <ul style="list-style-type: none"> • Fabricados con caucho natural. • Alta sensibilidad al tacto. • Mayor movilidad y flexibilidad • Hipoalergénicos. • Fácil colocación y ajuste natural. |
| MODO DE USO | <p><u>Antes de iniciar el procedimiento en el área:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar un correcto lavado de manos. • Verificar que los guantes no tengan agujeros. • Cubrir hasta la muñeca y verificar su ajuste. <p><u>Después de realizar el procedimiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirar sus guantes evitando el contacto con fluidos corporales o contaminados. • Desechar en el contenedor correspondiente. |
| PERIODICIDAD DE CAMBIO | Se debe realizar el cambio cuando termine una atención o procedimiento |
| MANTENIMIENTO | No reutilizable |
|  | |
| GUANTES DE NITRIL | |
| AREA | Consultorio Ginecológico - Sala de Procedimientos - Servicios Generales |
| CARACTERISTICAS | <ul style="list-style-type: none"> • Fabricados con polímeros sintéticos. • Mayor Resistencia. • Alta sensibilidad al tacto. • Alta resistencia a la perforación. • Mayor movilidad y flexibilidad • Hipoalergénicos. |
| MODO DE USO | <p><u>Antes de iniciar el procedimiento en el área:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar un correcto lavado de manos. • Verificar que los guantes no tengan agujeros. • Cubrir hasta la muñeca y verificar su ajuste. <p><u>Después de realizar el procedimiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirar sus guantes evitando el contacto con fluidos corporales o contaminados. • Desechar en el contenedor correspondiente. |
| PERIODICIDAD DE CAMBIO | Se debe realizar el cambio cuando termine una atención o procedimiento |
| MANTENIMIENTO | No reutilizable |
|  | |
| GUANTES DE CAUCHO | |
| AREA | Servicios Generales - Area de Residuos Sólidos |
| CARACTERISTICAS | <ul style="list-style-type: none"> • Fabricados con latex de caucho 100% natural. • Antideslizantes. • Satinados. • Generan mayor resistencia y durabilidad. • Mayor movilidad y flexibilidad |
| MODO DE USO | <p><u>Antes de iniciar el procedimiento en el área:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar un correcto lavado de manos. • Verificar que los guantes no tengan perforaciones. • Cubrir hasta la muñeca y verificar su ajuste. <p><u>Después de realizar el procedimiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirar sus guantes evitando el contacto con fluidos corporales o contaminados. • Realizar el proceso de limpieza y guardar en un área aséptica. |
| PERIODICIDAD DE CAMBIO | Se debe realizar el cambio cada mes |
| MANTENIMIENTO | Guardar en un lugar limpio y libre de contaminación. |
|  | |

| MONOGAFAS | | |
|-----------------------------------|--|---|
| AREA | Sala de Procedimientos | |
| CARACTERISTICAS | <ul style="list-style-type: none">• Diseñados para proteger contra salpicaduras e impactos.• Mayor comodidad y fácil ajuste.• Lentes panorámicas de policarbonato.• Diseño liviano y ergonómico. |  |
| MODO DE USO | <p><u>Antes de iniciar el procedimiento en el área:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Realizar un correcto lavado de manos antes de colocarse las monogafas.• Revisar que se encuentre en optimas condiciones para su uso y protección.• Verificar el ajuste correcto de las monogafas. <p><u>Despues de realizar el procedimiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none">•Realizar el proceso de desinfección.•Guardar en un área aséptica. | |
| PERIODICIDAD DE CAMBIO | Realizar el cambio cada 6 meses. | |
| MANTENIMIENTO | <ul style="list-style-type: none">• Realizar limpieza diaria del lente.• Guardar en su respectivo estuche para evitar daño físico. | |
| MASCARILLA QUIRURGICA | | |
| AREA | Atención al Usuario - Administración | |
| CARACTERISTICAS | <ul style="list-style-type: none">• Alta capacidad de filtración.• Ensamblado en 3 capas de protección.• Pinza nasal de fácil ajuste.• Bandas de ajuste para las orejas. |  |
| MODO DE USO | <p><u>Antes de iniciar el procedimiento en el área:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Realizar un correcto lavado de manos antes de colocarse la mascarilla.• Revisar la mascarilla que no tenga defectos.• Asegúrese que el lado correcto de la mascarilla quede hacia afuera.• Verificar que la mascarilla quede lo más cerca posible de la piel y ajustar la pinza nasal.• Una vez asegurada la mascarilla, acomódar para que cubra la cara y la boca, quedando en la parte inferior debajo de la barbilla. <p><u>Despues de realizar el procedimiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Retirar la mascarilla y desechar en el contenedor correspondiente. | |
| PERIODICIDAD DE CAMBIO | Debe desecharse despues de ocho horas de uso continuo. | |
| MANTENIMIENTO | No reutilizable | |
| MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA N95 | | |
| AREA | Consultorio Ginecológico - Sala de Procedimientos - Servicios Generales - Consultorio Médico - Area de Residuos Sólidos | |
| CARACTERISTICAS | <ul style="list-style-type: none">• Alta Eficiencia en la Filtración > 95%.• Ensamblado en 5 capas de protección.• Pinza nasal de fácil ajuste.• Bandas de ajuste para las orejas. |  |
| MODO DE USO | <p><u>Antes de iniciar el procedimiento en el área:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Realizar un correcto lavado de manos antes de colocarse la mascarilla.• Revisar la mascarilla que no tenga defectos.• Asegúrese que el lado correcto de la mascarilla quede hacia afuera.• Verificar que la mascarilla quede lo más cerca posible de la piel y ajustar la pinza nasal.• Una vez asegurada la mascarilla, acomódar para que cubra la cara y la boca, quedando en la parte inferior debajo de la barbilla. <p><u>Despues de realizar el procedimiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Retirar la mascarilla y guardar en un área aséptica para su uso durante su vida util. | |
| PERIODICIDAD DE CAMBIO | Debe desecharse después de 48 horas de uso continuo. | |
| MANTENIMIENTO | No reutilizable después de 48 horas | |

| BATA DE AISLAMIENTO | | |
|------------------------|---|---|
| AREA | Consultorio Ginecológico - Sala de Procedimientos | |
| CARACTERISTICAS | <ul style="list-style-type: none">• Material Polipropileno• Brinda protección de microorganismo e infecciones.• Cinturón ajustable.• Hipoalergénica.• Alta resistencia. |  |
| MODO DE USO | <p><u>Antes de iniciar el procedimiento en el área:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Realizar un correcto lavado de manos antes de colocarse la bata.• Evitar el contacto con el suelo u otro objeto de contaminación.• Verificar el ajuste correcto al cuerpo. <p><u>Después de realizar el procedimiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Retirar la bata y desechar en el contenedor correspondiente. | |
| PERIODICIDAD DE CAMBIO | Producto diseñado para un solo uso | |
| MANTENIMIENTO | No reutilizable | |
| BATA ANTIFLUIDOS | | |
| AREA | Consultorio Ginecológico - Consultorio Médico | |
| CARACTERISTICAS | <ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela Antifluído 100% poliéster• Alto nivel de protección ante la emisión de fluidos.• Tela resistente a la tensión y rasgado.• Proporciona mayor calidad y durabilidad. |  |
| MODO DE USO | <p><u>Antes de iniciar el procedimiento en el área:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Realizar un correcto lavado de manos antes de colocarse la bata.• Evitar el contacto con el suelo u otro objeto de contaminación.• Verificar el ajuste correcto al cuerpo. <p><u>Después de realizar el procedimiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Retirar la bata .• Realizar Lavado y conservar en un área aséptica. | |
| PERIODICIDAD DE CAMBIO | Realizar el cambio cada 6 meses. | |
| MANTENIMIENTO | Guardar en un lugar limpio y libre de contaminación. | |
| OVEROL ANTIFLUIDO | | |
| AREA | Servicios Generales - Area de Residuos Sólidos | |
| CARACTERISTICAS | <ul style="list-style-type: none">• Overol antifluído repelente a líquidos y partículas.• Elaborada con tela Antifluído 100% poliéster• Genera protección en todo el cuerpo ante la emisión de fluidos.• Alta durabilidad y Resistencia.• Proporciona elasticidad en puños, bota, capota y cintura. |  |
| MODO DE USO | <p><u>Antes de iniciar el procedimiento en el área:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Realizar un correcto lavado de manos antes de colocarse la bata.• Evitar el contacto con el suelo u otro objeto de contaminación.• Verificar el ajuste correcto al cuerpo. <p><u>Después de realizar el procedimiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Retirar el overol y guardar en un área aséptica. | |
| PERIODICIDAD DE CAMBIO | Realizar el cambio cada 3 meses. | |
| MANTENIMIENTO | Guardar en un lugar limpio y libre de contaminación. | |
| BOTAS | | |
| AREA | Servicios Generales - Area de Residuos Sólidos | |
| CARACTERISTICAS | <ul style="list-style-type: none">• Bota en pvc de alta flexibilidad.• Suela antideslizante con diseño ergonómico.• Impermeable.• Resistente al impacto y compresión. |  |
| MODO DE USO | <p><u>Antes de iniciar el procedimiento en el área:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Realizar un correcto lavado de manos antes de colocarse las botas.• Verificar el ajuste correcto en los pies. <p><u>Después de realizar el procedimiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Realizar limpieza y guardar en un área de aseo. | |
| PERIODICIDAD DE CAMBIO | Realizar el cambio cada año. | |
| MANTENIMIENTO | Guardar en un lugar limpio y libre de contaminación. | |
| POLAINAS | | |
| AREA | Sala de Procedimientos | |
| CARACTERISTICAS | <ul style="list-style-type: none">• Alto cubrimiento.• Repelente a fluidos.• Alta resistencia, firmeza y ajuste.• Hipoalergénica.• Antideslizante. |  |
| MODO DE USO | <p><u>Antes de iniciar el procedimiento en el área:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Realizar un correcto lavado de manos antes de colocarse las polainas.• Verificar el ajuste correcto en los pies. <p><u>Después de realizar el procedimiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Retirar las polainas y desechar en el contenedor correspondiente. | |
| PERIODICIDAD DE CAMBIO | Producto diseñado para un solo uso | |
| MANTENIMIENTO | No reutilizable | |